

 **FOODTEST200+**

UJJBEGY VÉRVETELI KÉSZLET ÚTMUTATÓ

Köszönjük, hogy igénybe veszi a **FOODTEST200+** vizsgálatot,
mely a leghatékonyabb, fehérjechip alapú ételintolerancia teszt!

A készlet tartalma:

1. Műanyag szállító cső
2. Vérvételi cső, egyszeri használatra
3. Vérvétel előtti bőrfertőtlenítő kendő
4. Kérőlap
5. Címkével ellátott boríték
a minta elküldéséhez
6. Papír tároló doboz
7. Ragtapasz
8. Jégakku



2049 Diósd, Álmos fejedelem utca 27.

Tel: (06-1) 424-0969

e-mail: info@foodtest.hu

www.foodtest.hu

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



2



3



4



6



9



10

1. Mossa meg a kezét alaposan meleg vízzel, mivel ez a bőr lágyítása és a vérkeringés fokozása révén elősegíti a vérvételt.
2. Távolítsa el a kupakot a szállító csőről és vegye ki belőle a vérvételi csövet.
3. Válassza ki a megszúrni kívánt ujját és tisztítsa meg a bőrfertőtlenítő kendő segítségével.
4. Enyhén csavaró mozdulattal húzza ki a védőkupakot a vérvételi tűből.
5. Tegye le a kiválasztott és megtisztított ujját ujjbeggyel felfelé egy asztalra, elkerülve, hogy a szúrásakor elrántsa ujját.
6. Helyezze ujjbegyére a vérvételi tűt. Javasolt nem az ujjbegy közepére, hanem a középvonaltól néhány milliméterrel oldalra helyezni.
7. Határozott mozdulattal nyomja meg a tű másik végét. A tű kiugrásakor enyhe szúrást fog érezni.
8. Óvatosan masszírozza az ujját a bemetszés irányában, hogy a megjelenő vércsepp térfogata növekedjen.
9. Helyezze az ujját a vérvételi cső nyílásához. A vércseppet a cső belső falához érintve cseppentsen vért a csőbe. Töltse meg félig a csövet vérrel. Amennyiben ez nem sikerül, akkor egy másik ujján ismételje meg a mintavételt a készletben található tartalék tűvel.
10. Írja rá a nevét és a születési dátumát a műanyag szállító csőre, helyezze bele a vérvételi csövet és zárja le.
11. Töltse ki és írja alá a mellékelt Kérőlapot.
12. A vérmintát a műanyag szállító csőbe, a kitöltött kérőlapot és a használt tűket helyezze a műanyag szállító dobozba.
13. Tegye a dobozt a készlethez tartozó címkével ellátott borítékba és kövesse a borítékon található utasításokat.

Amennyiben az ujjbegy vérvétel bármilyen ok miatt meghiúsul vagy a beérkezett mintát a laboratórium nem megfelelőnek minősíti, akkor Önnek lehetősége van laboratóriumunkban előre egyeztetett időpontban vérvételt igényelni, mely semmilyen plusz költséggel nem jár.

A vérvételt ajánlott hétfői napon elvégezni.

Leletét 10 munkanapon belül kapja meg

a kérőlapon megadott e-mail címére.

Kérjük, hogy ellenőrizze még egyszer e-mail címét a kérőlapon!

Bármilyen kérdés esetén keressen minket a megadott elérhetőségek egyikén.

2049 Diósd,
Álmos fejedelem utca 27.
Tel: (06-1) 424-0969
e-mail: info@foodtest.hu
www.foodtest.hu